

NovoPen Echo®



Fármaco/Princípio ativo	N/A
Concentração	N/A
Apresentação/Descrição do produto	NovoPen Echo® é uma caneta aplicadora durável desenvolvida para ser utilizada para a autoaplicação, por pacientes com diabetes. NovoPen Echo® deve ser usada com os carpules Penfill® de 3 mL de insulina Novo Nordisk e as agulhas descartáveis NovoFine® (insulinas e agulhas separadamente). A caneta fornece doses de 0,5 a 30 unidades em incrementos de meia unidade (0,5). NovoPen Echo® é uma caneta durável para aplicação de insulina com função de memória de dose.
Forma farmacêutica	N/A
Prazo de validade	Utilizar até 24 meses após a data de fabricação. Após o primeiro uso, válida por 60 meses
Classe terapêutica	N/A
Indicação terapêutica	N/A
Medicamento controlado? Se sim, qual lista?	N/A
Cuidados de conservação	<ul style="list-style-type: none"> - Somente utilize NovoPen Echo® como descrito na instrução de uso. - Não derrube ou bata a caneta contra superfícies duras. Se você deixá-la cair ou suspeitar de problemas, verifique se o carpule de insulina não apresenta danos, como rachaduras. Substitua o carpule por um novo, se necessário. - Mantenha a caneta longe da luz solar direta, não exponha a poeira, sujeira ou líquido. - Não exponha a caneta (sem um carpule de insulina inserido) a temperaturas abaixo de -25 °C ou acima de +45 °C. Não exponha a caneta a temperaturas abaixo de +5 °C por mais de um mês. - Com um carpule de insulina inserido, por favor verifique as instruções de armazenamento na bula do carpule Penfill® 3 mL que vem junto com a embalagem do carpule Penfill® 3 mL. - Não tente reparar a caneta ou desmontá-la. - A bateria dura por 4 a 5 anos. Para sua segurança, ela não é substituível. - Quando a bateria estiver fraca, entre em contato com o serviço de atendimento da Novo Nordisk. - Você ainda pode usar a caneta para injetar insulina sem utilizar a memória de dose.
Contraindicação de bula	N/A
O medicamento pode ser fracionado?	N/A
Programa de Benefício em Medicamentos	Consulte em: www.novodia.com.br

[Clique aqui e acesse a bula de NovoPen Echo®](#) →